


HEXAETCH

37% PHOSPORIC ACID

Hexaetch, adalah Produk yang di formulasikan untuk Surface treatment baik Enamel dan Dentine, dengan kandungan 37% Phosphoric acid, bersifat thixotropic.

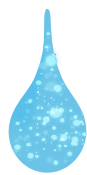


37%
PHOSPHORIC ACID



**VISKOSITAS
MEDIUM**

Diameter Mikroporositas

Berdasarkan hasil perhitungan diameter mikroporositas, terdapat perbedaan signifikan antara penggunaan metode Self Etch dan Total Etch pada produk Hexaetch dibandingkan dengan kelompok kontrol. Penggunaan Hexaetch Total Etch menghasilkan diameter mikroporositas yang paling besar dan signifikan, yakni dua kali lipat lebih besar dibandingkan metode Self Etch maupun tanpa perlakuan (kontrol). Hal ini menunjukkan bahwa metode Total Etch jauh **lebih efektif** dalam menciptakan pori-pori mikro pada permukaan subjek yang diuji.

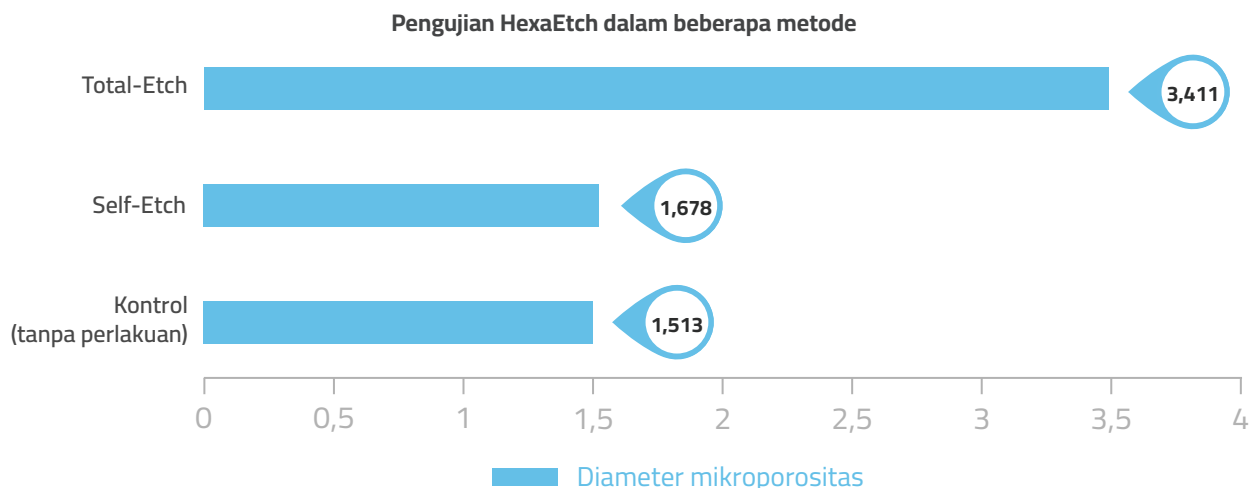

PETUNJUK PEMAKAIAN

1 Bersihkan dan isolasi permukaan gigi yang akan diaplikasikan.

2 Aplikasikan pada permukaan dentine atau enamel secara langsung atau dengan mikroaplikator




3 Diamkan selama 15 detik, lalu cuci bersih dengan air dan keringkan dengan angin.




INDIKASI

Enamel & Dentine Etch.


Uji Scanning Electron Microscopy

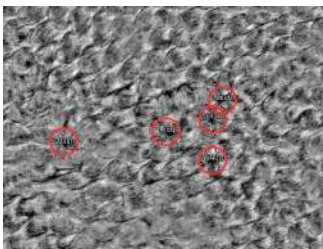

Sampel 1

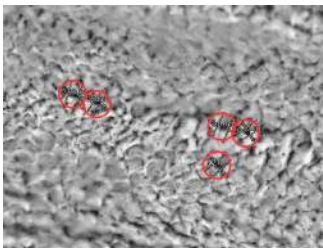

Sampel 2

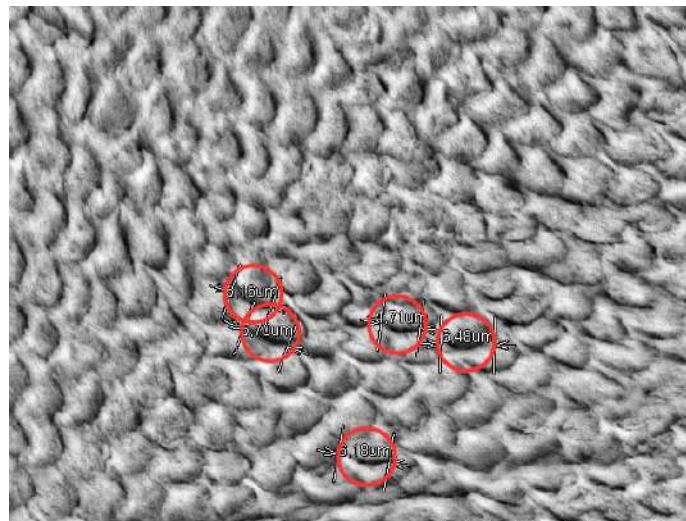

Sampel 3

Kasus Klinis



drg. Fajarini, Sp. Ort



The translucency is top notch. You barely see any excess! Maximum bond strength. As now, a week after, all of the braces are still intact. They say don't jinx it.



Foto klinis atas izin drg. Fajarini, Sp. Ort